

Raccomandazioni SIEOG per la prevenzione della contaminazione, la pulizia e la disinfezione degli ambulatori e delle apparecchiature ecografiche

- in caso di pazienti con **sospetta/confermata infezione** da SARS-CoV2, l'esame ecografico deve essere eseguito in un **ambulatorio dedicato** oppure, se non disponibile, **al termine della sessione** ecografica
- Deve essere utilizzata **carta monouso** al fine di evitare il contatto tra la paziente ed il lettino della stanza ecografica
- Le pazienti devono essere invitate a tenere le **braccia ripiegate sul petto** ed evitare contatti diretti con le attrezzature mediche e con il personale
- L'ambiente deve essere **aerato** tra un esame e l'altro
- Al termine di ogni esame le sonde addominali ed endovaginali devono essere sottoposte a **pulizia con acqua** asciugate con panno morbido e **successiva disinfezione** con soluzione di **ipoclorito di sodio** (Antisapril Blu 2%) o con altro disinfettante di comprovata efficacia contro Coronavirus
(DM 5443 22/02/20 <https://www.camera.it/temiap/2020/02/24/OCD177-4307.pdf>)
- **Al termine** di ogni sessione ecografica si deve procedere alla **detersione accurata**
 - dell'**ecografo** (sonde, schermo, tastiera),
 - del **PC** (mouse, fili, schermo, tastiera),
 - **lettino**,
 - **scrivania**e **successiva disinfezione** mediante soluzione di **ipoclorito di sodio** (Antisapril Blu 2%) o con altro disinfettante di comprovata efficacia contro Coronavirus (DM 5443 22/02/20 <https://www.camera.it/temiap/2020/02/24/OCD177-4307.pdf>)